


衣服内温度計

らん'sナイト セルフ

Ran's Night Self

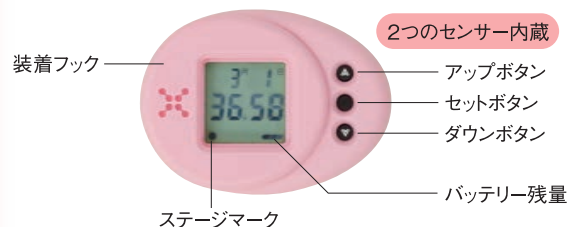

シンプル画面とシンプル操作で分かりやすい！

朝目覚めたらRan's Night Selfを衣服から取り外し
温度を確認してください



セットボタン●を押すと
今日の温度が表示
されます



ダウンボタン▼を1回
押すと昨日の温度が
表示されます



ダウンボタン▼を2回
押すと一昨日の温度
が表示されます

主な仕様

品 名 衣服内温度計 Ran's Night Self (らん'sナイト セルフ)
主な素材 抗菌ABS樹脂 (外装ケース、電池ケース、装着クリップ)
外観寸法 長さ69×幅51×厚さ12mm (クリップ高さ5.3mm)
重 さ 約31g (電池1個含む)
測定方法 2つの温度センサーが設定時刻より10分毎に、6時間後まで計測
温度精度 精度: ±0.5°C (32~40°C)、分解能: ±0.0625°C (32~40°C)
保管条件 温度0°C~50°C
付 属 品 ボタン電池 (CR2032コイン型リチウム電池) 1個、取扱説明書
生 産 国 日本

Ran's Night

2008年キッズデザイン大賞受賞

マンダリンオレンジ



アボカド
グリーン



Ran's Night Self 姉妹品

Ran's Nightは、計測データをQRコード
で表示、携帯電話やスマホから瞬時に
データ送信できるのでWEBで簡単に
データ管理が行えます。

マンダリンオレンジ/アボカドグリーン
標準価格 8,800円(税別)

製造元: キューオーエル株式会社

専用サイト Ran's Story
<http://rans-story.jp>

計測データは簡単WEB管理。温度情報の
ほかに、月経の色や量、カラダやココロの状
態も記録しよう！

FUJIKIN SOFT®

フジキンソフト株式会社



連絡先

フジキンソフト株式会社(フジキンうめきたナレッジセンタ)
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪
ナレッジキャピタルタワーC

フジキンソフト株式会社(秋葉原テクニカルセンタ)
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル

お問い合わせ先

個人のお客様 大阪:06-4967-4881 東京:03-6757-0041
法人のお客様 大阪:06-4967-4871

※受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日及び休暇期間は除く)※

<http://www.fujikinsoft.co.jp/>



オリエンタルブルー ロータスピンク



ホワイトピンク クリアパープル クリームイエロー

標準価格 5,980円(税別)

・開発元: キューオーエル株式会社

・Ran's Nightはキューオーエル株式会社の登録商標です。

このカタログ情報は2014年5月現在のものです。

お断り無く仕様・標準価格を変更する場合がございますのでご了承下さい。

取扱店



眠っている間に自動計測するから、毎朝の煩わしさから解放されます
もっ少し寝ていたい私の朝の5分！

着けて、眠るだけ。

衣服内温度計

らん'sナイト セルフ

Ran's Night Self



私の毎日を整える、
からだリズム



着けて、眠るだけ。 だから続けられる

衣服内温度計とは

衣服内温度計は、文字通り衣服内の温度を測る温度計です。
毎晩、初期設定で設定した開始時間からきっちり6時間、10分毎に
衣服内の温度を計測し、記録します。
お休み前に、パジャマのウエストに装着してください。
朝、目覚めてセットボタンを押すと計測温度が表示されます。

Ran's Night Selfの使い方は とても簡単 6時間で37回測定



パジャマのウエストに
はさんで寝るだけ



2つのセンサーが10分間隔で
朝まで自動測定(約6時間)



セットボタンを押すと今日の温度が
表示されます。計測した温度は、
15日間保存されます

クリップ式で簡単装着



※本品は、体温計ではありません。(医療機器ではありません。)
あくまでも健康管理の目安としてご使用いただき、発熱等疾病の疑いがある場合は、体温計で検温し、受診することをお勧めします。

Ran's Night Selfについて よくある質問にお応えします！

● どうしてセンサーが2つあるの？

最適な条件で測定された温度を取得するためです。
お布団側(外側)と、おなか側(内側)の温度から、測定状況(お布団やエアコンなどの影響)を判断し不適な条件で計測された温度をはじいています。

● 6時間、37回も計測するのはなぜ？

眠っている間の温度を出来るだけ多く測定することで、より精度の高い温度データを取得しています。眠っている間に、お布団がはがれたり、うつ伏せになったりと不適な条件での計測があっても、それらをはじいた「最適な温度」を表示することができます。
※2〜3時間以上の計測データが取得できれば、その日の最適温度が表示されます。

● 寝相が悪いんだけど・・・

大きめのクリップで、しっかりと衣服をはさみ込むので安心です。
※衣類の厚さや着用箇所によっては、まれにはずれてしまうこともございます。その場合は、腹巻などを着用いただくことをおすすめしております。

● トイレに行くときは、 はずしても大丈夫？

データ取得に大きな影響はありませんので、安心しておはずしてください。
※防水ではありませんので、誤って落してしまうように必ずお取りはずしてください。

かわいい卵形の
Ran's Night Selfは
「着けて、眠るだけ」
だから
続けられます！

かわいいカラーの
全5色が勢揃い！

あなたは、どのカラーの
Ran's Night Selfが
好きですか？



オリエンタルブルー

クリアパープル

クリームイエロー

ロータスピンク

ホワイトピンク